

Hausnotrufgerät aufschalten

- **Installation des Gerätes**
- Das Stromkabel am Gerät in den Anschluss (AC), das andere Ende des Kabels in die Stromsteckdose stecken.
- Das Telefonkabel in den Anschluss „Line“ am Gerät, das andere Ende des Kabels in die **linke** Telefondose stecken.

- **Testen des Gerätes**
- Erster Funktionstest – Auslösung am Gerät.
- Auf die Meldung der Leitstelle warten und die ID- Nummer (mit der Hand geschriebene ID-Nummer auf der Rückseite des Gerätes) abgleichen.
- Mit dem Kunden klären, ob ein Armband oder eine Halskette gewünscht ist. Anschließend den Funkfinger dem Kunden übergeben, der diesen ebenfalls nochmal auslöst..

- Vertrag und Alarmplan ausfüllen sowie bei vorhandener Pflegestufe zusätzlich den Antrag auf Kostenübernahme und die Erklärung zum Erhalt eines Pflegehilfsmittels.